



Käyttöohje VaPro Pocket™ -kertakatetrille



1. Ota kaikki tarvikkeet esille ja valmistelee alue, jossa katetroit.
2. Pese kädet terveydenhuollon ammattilaisen ohjeiden mukaan.
3. Ota katetroiin sopiva asento. Avaa ja poista vaatteitasi riittävästi, jotta pystyt käsittelemään genitaaleja.



4. Avaa pakkaus vetämällä sormenreistä itseäsi kohti ja koko pakkauksen mitalta alas.
5. Ota katetri pakkauksesta. Aseta pakkaus syliisi, pesualtaan reunalle tai muulle tasaiselle pinnalle. Aseta katetri avatun pakkauksen päälle.
6. Pidä siirtimestä kiinni ei-dominoivalla kädelläsi ja säilytä otteesi koko toimenpiteen ajan. Vedä esinahkaa (jos sinulla on sellainen) taaksepäin ja puhdista terska ja virtsaputken suu noudattaen terveydenhuollon ammattilaisen ohjeita.

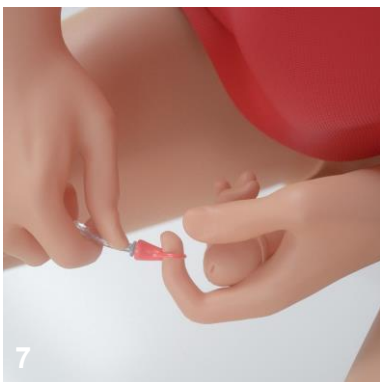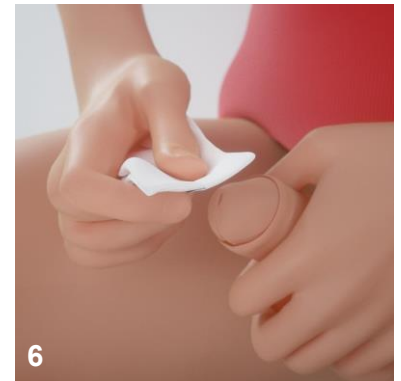

7. Poista suojakärjen korkki.
8. Ota katetri ei-dominoivaan käteen ja liu'uta sitä toisella kädellä eteenpäin, kunnes katetrin kärki on kokonaan suojakärjen sisällä. Varo työntämästä katetria kärjestä ulos.
9. Tartu katetrasta kiinni suojakärjen levyn alapuolelta.



HydraBalance™
Lubricating -teknologia



HydraBalance™
Lubricating Technology

VaPro Pocket™
No Touch Intermittent Catheter




10. Purista siirtintä hellävaroen ei-dominoivan käden etusormella ja peukalolla virtsaputken suuaukon avaamiseksi. Vie suojakärki dominoivalla kädelläsi sisään, niin että levyosa osuu virtsaputken suuaukkoon.

11. Suorista siitin ylöspäin ja vie katetri sisään, kunnes virtsaa alkaa tulla.

12. Kun virtsaa ei enää tule, vedä katetria hitaasti takaisinpäin. Jos virtsaa alkaa tulla uudestaan, odota, kunnes virtsaa ei enää tule. Kun virtsarakko on varmasti tyhjä, vedä katetri kokonaan ulos. Aseta esinahka takaisin paikalleen (jos sinulla on esinahka).

13. Katetrin voi laittaa jäteastiaan. EI SAA HUUHTOA VESSANPÖNTÖSTÄ ALAS.

14. Pese kädet.

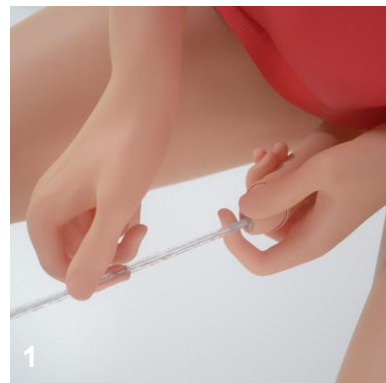

Ei sisällä luonnonkumilateksia. Kertakatetri ei sisällä PVC:tä tai ftalaatteja. Koostumus: polyuretaanisuojaus, termoplastinen elastomeerikärki ja -letku.

Käyttöaiheet ja käyttötarkoitus: Tämä kertakatetri on virtsaputkeen vietävä taipuisa putkimainen laite, jota käytetään mies-, nais- ja lapsipotilaiden virtsarakon tyhjentämiseen virtsasta.

VAROITUKSET: Älä käytä, jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut. Laitetta ei saa käyttää uudelleen infektionriskin ja/tai muiden komplikaatioiden välttämiseksi. Jos epämiellyttäviä tuntemuksia tai vaurion merkkejä ilmenee, lopeta katetrin käyttö heti ja ota yhteyttä sinua hoitavaan terveydenhuollon ammattilaiseen.

Varoitimet: Keskustele sinua hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen tämän tuotteen käyttöä, jos sinulla on jokin seuraavista:

- Vaurioitunut virtsaputki
- Huomattava kurouma
- Uretriitti (virtsatietulehdus)
- Epididymiitti (lisäkiestulehdus)
- Virtsaputken verenvuoto tuntemattomasta syystä
- Väärä katetrin kulkureitti
- Prostatitiitti (eturauhastulehdus)

Itsekatetroinnissa on noudatettava terveydenhuollon ammattilaisen hoitosuunnitelmaa ja -neuvoja, ja sen saa tehdä vain annettujen käyttöohjeiden mukaan. Katetrointihoitus vaihtelee yksilöittäin, joten hoitava terveydenhuollon ammattilainen kertoo sinulle suositellun katetrointihoituksen. Jos sinulla on muuta kysyttävää katetroinnista, ota yhteyttä sinua hoitavaan terveydenhuollon ammattilaiseen.

HUOMAA: Säilytä pakkaukset huoneenlämmössä. Kontinenssituotteiden käyttöön saat ohjeita terveydenhuollon ammattilaisilta. Mikäli tuotteen käyttöön liittyen ilmenee vakava loukkaantuminen (tai muu vakava tapahtuma), ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajaan sekä paikalliseen toimivaltaiseen viranomaiseen. Lisätietoja saat osoitteesta www.hollister.fi tai ottamalla yhteyttä valtuutettuun edustajaan/vastuuhenkilöön tai paikalliseen jakelijaan.

Dansac and Hollister Scandinavia Inc.

Metsäläntie 20
00320 Helsinki
Asiakaspalvelu puh. 0800 416 200
info.fi@hollister.com
www.hollister.fi



Katso ohjevideo:
[www.Hollister.com/
VaProPocketVideo](http://www.Hollister.com/VaProPocketVideo)