

Användarguide Infyna Chic™ hydrofil kateter



1. Börja med att ta fram allt du behöver för att tömma urinblåsan. Tvätta sedan dina händer noggrant.



2. Välj en bekväm ställning för kateterisering. Ta ev. av kläder för att enklare komma åt underlivet. Sära på blygdläpparna med en hand. Vid behov rengör underlivet.



3. Öppna behållaren genom att trycka upp locket med din hand så att förseglingen bryts.



4. Greppa konan och dra ut katetern. Var noggrann med att inte röra andra delar av katetern. Lägg ifrån dig behållaren.



5. Sära på blygdläpparna med två fingrar på din lediga hand. För in katetern i urinröret tills urinen börjar rinna.



6. När urinen slutat rinna drar du långsamt ut katetern. Om urin börja rinna igen, pausar du tills urinflödet helt slutat. När du är säker på att blåsan är tom, dra långsamt ut katetern.



7. Placera katetern tillbaka i behållaren, stäng locket och kassera, antingen direkt eller när tillfälle ges. **FÅR EJ SPOLAS NED I TOALETEN.**



8. Avsluta med att tvätta dina händer.

Infyna Chic™
Hydrofil kateter

Infyna Chic™ hydrofil tappningskateter

Klar att använda

Steril kateter som kan användas direkt

Uppfällbart lock

Kan öppnas och stängas med en hand

Säker återförslutning

Läcker ej vid återförslutning i behållaren



Med hänsyn till dig och miljön

PVC-fri med återvinningsbar behållare



Greppvänlig

Konan på kateterens topp är greppvänlig och kan användas även vid nedsatt handfunktion

Varning: Använd inte om förpackningen är skadad eller öppnad. För att minska risken för infektioner och andra komplikationer får du inte återanvända produkten. Om obehag eller något tecken på skada förekommer ska du sluta använda produkten och rådfråga din läkare.

Försiktighetsåtgärder: Rådfråga din läkare innan du använder produkten om något av följande tillstånd förekommer: Skadad uretra, oförklarad blödning i uretra, tydlig förträngning, falsk passage, uretrit – urinströsinflammation. Självkateterisering ska följa vårdplanen och rådgivningen från din läkare och enbart utföras enligt de tillhandahållna bruksanvisningarna. Eftersom kateteriseringsfrekvensen varierar per person bör den rekommenderade frekvensen för din kateterisering tillhandahållas av din läkare. Om du har andra frågor om kateteriseringen ska du kontakta din läkare.

Viktigt! Förvara förpackningarna liggandes och vid normal rumstemperatur. Om du behöver hjälp med produkterna kontaktar du sjukvården. Kontakta din lokala distributör eller tillverkaren, samt lokal behörig myndighet, om en allvarig personskada (incident) skulle inträffa i samband med användning av produkten. För mer information, se www.hollister.com/authority eller kontakta EC-representanten eller den lokala distributören.

Före användning, var noga med att läsa användarinstruktionerna för information om avsedd användning, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och instruktioner.

Dansac and Hollister Scandinavia Inc.,

Suomen Sivuliike
Metsäläntie 20, 00320 Helsinki
Tel. 0800 416 200
info.fi@hollister.com
www.hollister.fi/sv-fi/